

NOTE TECHNIQUE : QUANTUM QLNES

Assouplissement du ressort joystick sur QLNES

Avec clip/bague inférieure en place : 238 grammes.

Sans clip/bague inférieure enlevée : 177 grammes.

1 Défaire les 4 vis Torx T8 ci-contre.



2 Retirer l'embout de joystick et le soufflet. Puis retirer le clip plastique blanc à la base du joystick afin d'assouplir le ressort du joystick.



3 Remonter l'ensemble soufflet, embout et visserie.

