

CONSIGNES DE CHARGE BATTERIES (SAUF BATTERIES LITHIUM)

Annule et remplace les consignes de chargement de batteries de votre manuel d'utilisation

Document à retourner complété et signé dans le mois suivant la réception du produit



Afin d'optimiser la durée de vie de vos batteries, voici quelques conseils à respecter lors de vos cycles de charges. La durée de vie des batteries de votre matériel est susceptible de varier en fonction des cycles de charge réalisés, des conditions d'utilisation du matériel. La garantie des batteries pourra être remise en cause en cas de non-respect des consignes de charge ci-dessous.

1- Comment utiliser mon chargeur ?

- Matériel éteint
- Pour commencer, je connecte la prise du chargeur à mon matériel (manipulateur ou prise de charge)
- Je connecte ensuite le chargeur à la prise secteur afin de démarrer une charge
- J'attends que le chargeur m'indique une charge terminée, voyant vert fixe (durée d'un cycle de charge entre 8h et 10h)
- Je déconnecte mon chargeur de la prise secteur
- Je peux ensuite débrancher la prise chargeur de mon matériel

2- Quand charger mon matériel ?

- La première charge sur fauteuil roulant électrique / scooter neuf ou batteries neuves doit être de 24h sans interruption
- Sur le premier mois d'utilisation, utiliser votre matériel tous les jours afin de pouvoir recharger les batteries chaque jour (même après une courte utilisation), les batteries atteignant leur capacité maximum au bout de 25 cycles de charge complets environ
- Passé ce premier mois d'utilisation charger vos batteries en fonction de l'intensité de votre utilisation :
 - Tous les jours lors d'une utilisation intensive du matériel
 - Jusqu'à 3 ou 4 jours maximum entre chaque charge si le matériel est utilisé modérément
- Chaque charge doit être effectuée entièrement jusqu'à la fin du cycle chargeur
- Je peux déconnecter mon chargeur

3- Durée de vie des batteries

- La durée de vie des batteries est exprimée en nombre de cycles de charge
- Cette durée de vie estimée est donnée pour des cycles de charge démarrés sur des batteries à 50% de décharge
- Charger des batteries tous les jours inutilement (batterie restante entre 80% et 100%) consomme des cycles sur la durée de vie de celles-ci, cela réduit également la durée de vie de vos batteries
- Des charges incomplètes réduisent la durée de vie de vos batteries
- Il est fortement conseillé de ne pas attendre d'arriver sous 40% de niveau de batterie avant d'effectuer une recharge, cela réduit également la durée de vie de vos batteries
- En cas d'inutilisation du matériel, charger vos batteries toutes les 2 semaines afin de les conserver en état

4- Quand charger mon matériel ? Visuel indication de charge restante

➤ **Electronique NE+**

- Batterie comprise entre 70% et 100% = **JE NE CHARGE PAS** mon matériel



- Batterie à 50% (ou comprise entre 40% et 70%) = **JE DOIS CHARGER** mon matériel sans interruption



- Batterie à 30% = **JE DOIS CHARGER** mon matériel **IMMEDIATEMENT** sans interruption



➤ **Electronique QLogic 3e et QLogic 3**

- Jauge batterie en verte, ou supérieure à 70% = **JE NE CHARGE PAS** mon matériel



- Jauge batterie en jaune (ou comprise entre 40% et 70%) = **JE DOIS CHARGER** mon matériel sans interruption



- Jauge batterie en rouge inférieure à 30% = **JE DOIS CHARGER** mon matériel **IMMEDIATEMENT** sans interruption



A l'attention de l'utilisateur :

Nous tenons à souligner l'importance de prendre connaissance du document ci-joint traitant du thème crucial des charges de batterie. Comprendre les différents aspects de ce sujet est essentiel pour optimiser l'utilisation et la durabilité de votre fauteuil électrique ou scooter. En examinant attentivement ce document, vous serez mieux informé pour prendre des décisions éclairées concernant la gestion et l'entretien de vos batteries, ce qui pourrait avoir un impact significatif sur leur performance et leur longévité.

Nous vous encourageons donc vivement à accorder du temps à l'étude de ce document, car il contient des informations précieuses qui pourraient bénéficier grandement à vos activités quotidiennes.

Nous vous remercions pour l'attention portée à ces informations.

Modèle :

Numéro de série :

Prestataire de santé

Nom / Prénom :

Date :

Signature :

Utilisateur du matériel

Nom / Prénom :

Date :

Signature :

Centre d'hébergement

Nom / Prénom :

Date :

Signature :

NB : Document à scanner recto/verso une fois signé, et à retourner par e-mail à la société Pride Mobility Products (sav@quantum-rehab.fr) pour enregistrement